

INSTRUCCIONES

- Pase los brazos a través de las cintas elásticas a modo de chaleco, con el soporte rígido en la espalda.
- Fije al abdomen el fajín con velcro colocando la parte izquierda por debajo de la derecha y ajústelo de manera que quede firme, pero cómodo.
- Para regular la tensión de la espalda y los hombros, así como favorecer una postura recta, estire de las cintas elásticas situadas sobre el fajín y fíjelas con el velcro, ambas a la misma altura y sin juntarse, hasta obtener la tensión deseada. Debe aplicar la tensión suficiente para mantener espalda y hombros rectos, pero si producir molestias.
- Posture Corrector Adapt Pro de InnovaGoods® es talla única y totalmente regulable. La longitud de las tiras elásticas se puede regular subiendo o bajando el triángulo con velcro del soporte de la espalda. Situar el triángulo más abajo corresponde a tallas pequeñas y más arriba a tallas más grandes.

La regulación de las tallas es orientativa, dependerá del nivel de tensión que necesite o con la que se sienta cómodo.

Si las cintas de velcro de izquierda y derecha se tocan en el centro, coloque el velcro de la espalda en una posición más baja, y al contrario si necesita más longitud de cinta elástica.

Para evitar posibles molestias, comience a utilizar Posture Corrector Adapt Pro de InnovaGoods® 1 o 2 horas al día y aumente el tiempo progresivamente. Una vez se acostumbre, lo podrá utilizar el tiempo que necesite.

ADVERTENCIAS

Si siente alguna molestia cuando utilice es dispositivo, deje de utilizarlo y consulte a un médico. Este dispositivo no sustituye ningún tratamiento médico. No lo utilice si sufre alguna lesión de espalda, hombros, pecho o abdomen. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad.

PICTOGRAMAS

1. Foto pasando los brazos por las cintas quedando atrás el soporte
2. Foto ajustando las cintas elásticas con velcro
3. Foto regulando (arriba-abajo) el triángulo con velcro de la espalda